

エラスティックラップ

超強力エラスティックと横目地のナイロン繊維との組合せにより、耐久性に優れたテーピングとサポーターの効果を併せ持ったラップサポーター

ベージュ 肘・足首用

エラスティックラップ

FR-2101 / ELASTIC WRAP



商品コード	JANコード	左/右	カラー	商品サイズ	入数/箱
FR-2101		共通	ベージュ	長さ76×幅7.5cm	1入

◎メーカー希望小売価格/箱 **¥1,080** (本体価格¥1,000)


■用途: 足関節・肘の圧迫・固定 ■台湾製

■GS1-128対応

- 「スターターループ」の採用で巻き位置を設定し、圧迫感を簡単に調節できます。

装着手順

【足首用】

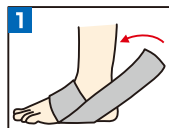


1 輪の部分を土踏まずまで、通してください。




2 強さを調節しながら8の字(フィギュア8)状に巻いていきます。

【肘用】

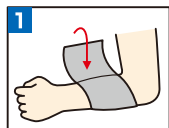

1 輪の部分を肘近くまで通してください。

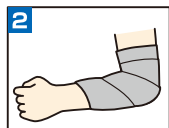

2 強さを調節しながら巻いてください。

ベージュ 膝・ふくらはぎ用

エラスティックラップ

FR-2120 / ELASTIC WRAP



商品コード	JANコード	左/右	カラー	商品サイズ	入数/箱
FR-2120		共通	ベージュ	長さ125×幅7.5cm	1入

◎メーカー希望小売価格/箱 **¥1,512** (本体価格¥1,400)


■用途: 膝関節・大腿・下肢の圧迫 ■台湾製

■GS1-128対応


- 「スターターループ」の採用で巻き位置を設定し、圧迫感を簡単に調節できます。

装着手順

【膝用】

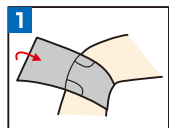


1 テープファスナーを上にして巻き始めを固定してください。

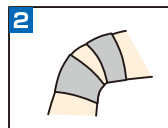

2 強さを調節しながら巻いてください。

【ふくらはぎ用】

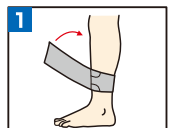

1 テープファスナーを上にして巻き始めを固定してください。



2 強さを調節しながら巻き上げてください。

ベージュ 手首用

エラスティックラップ

FR-2181 / ELASTIC WRAP



商品コード	JANコード	左/右	カラー	商品サイズ	入数/箱
FR-2181		共通	ベージュ	長さ26×幅7.5cm	1入

◎メーカー希望小売価格/箱 **¥756** (本体価格¥700)


■用途: 手関節の圧迫・固定 ■台湾製

■GS1-128対応

- 「スターターループ」の採用で巻き位置を設定し、圧迫感を簡単に調節できます。

装着手順

【手首用】

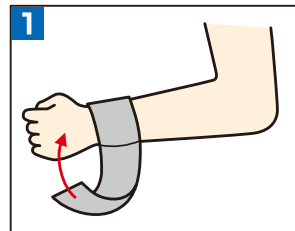

1 輪の部分に手首を通して、お好みの強さに巻いてください。