

ラテックス (天然ゴム) 製手袋



《パウダーなし》

ファーストグローブ

FR-945~948 / FIRST GLOVES

5.8g

食品衛生法
適合品

未滅菌



商品コード	JANコード	サイズ	手巻編	パッケージ	入数/箱
FR-945	4 560168 809458	SS	75	ピンク	100入
FR-946	4 560168 809465	S	85	ブルー	
FR-947	4 560168 809472	M	95	ブラウン	
FR-948	4 560168 809489	L	105	グリーン	

- ◎メーカー希望小売価格/箱 オープン価格
- ASTM D3578規格適合品 ●インドネシア製 ●GS1-128対応
- 衛生的で、指にピッタリフィットする天然ゴム製未滅菌パウダー無し手袋です。
- 指先~手のひらまでエンボス(凸凹)加工しています。
- パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。
- 経済的な左右兼用手袋です。
- 落下菌混入を防ぐ為に、取出口にフィルム張りを施しています。



梱包単位: 10箱/ケース

《パウダーなし》

パワーグローブ

FR-960~964 / POWER GLOVES

5.8g

未滅菌

グリップ
強

SSS



商品コード	JANコード	サイズ	手巻編	パッケージ	入数/箱
FR-964	4 560168 809076	SSS	65	オレンジ	100入
FR-960	4 560168 809601	SS	75	ピンク	
FR-961	4 560168 809618	S	85	ブルー	
FR-962	4 560168 809625	M	95	ブラウン	
FR-963	4 560168 809632	L	105	グリーン	

- ◎メーカー希望小売価格/箱 オープン価格
- ASTM D3578規格適合品 ●インドネシア製 ●GS1-128対応
- グリップ性の高いパウダー無し天然ゴム製グローブです。
- 指先~手のひらまでエンボス(凸凹)加工しています。
- インストルメント等をご使用する際に適しています。
- パウダーアレルギーが気になる方でも安心してご使用になれます。
- 落下菌混入を防ぐ為に、取出口にフィルム張りを施しています。



梱包単位: 10箱/ケース


《パウダー付き》

フレックスグローブ

FR-940~943 / FLEX GLOVES

5.7g

未滅菌

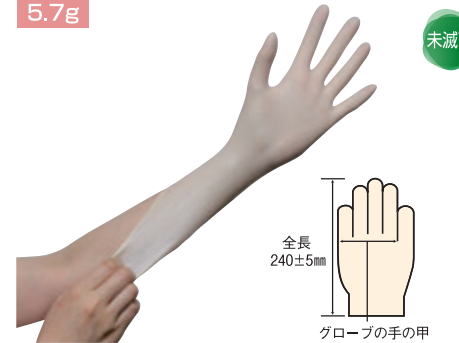

商品コード	JANコード	サイズ	手巻編	パッケージ	入数/箱
FR-940	4 560168 809403	SS	75	レッド	100入
FR-941	4 560168 809410	S	85	イエロー	
FR-942	4 560168 809427	M	95	オレンジ	
FR-943	4 560168 809433	L	105	ブルー	

- ◎メーカー希望小売価格/箱 オープン価格
- ASTM D3578規格適合品 ●インドネシア製 ●GS1-128対応
- 指にフィットする天然ゴム製未滅菌パウダー(コンスターチ)付手袋です。
- 一切エンボス(凸凹)加工をしていません。
- 薄手仕上げなので、素手感覚の使い心地です。
- 左右兼用で経済的です。
- 落下菌混入を防ぐ為に、取出口にフィルム張りを施しています。




梱包単位: 10箱/ケース

グローブの 装着方法について

手袋の薄肉化が一段と進み、手袋の指先に触れない装着が求められる中、従来とは異なる装着方法を推奨させて頂いております。


Step I

- ① 予め手を洗い、ペーパータオルなどで十分に水分を取り除いてください。
- ② 手袋表面を汚染させないように出来るだけ袖口近くを軽く摘み、1枚を取出します。
※手袋は手の大きさに合ったサイズを選んでください。

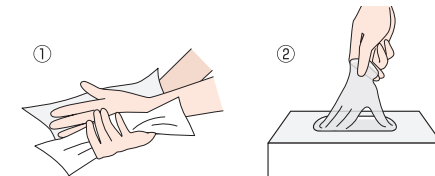

Step II

- ③ 手袋を軽く手に被せます。
- ④ 手袋の内側から掌の下側と袖口をまとめてつまみ、ゆっくりとズラしながら手に被せます。
- ⑤ 同様にもう片方の手袋を取り出して装着します。

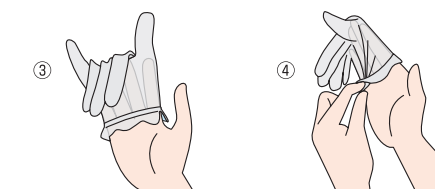

Step III

- ⑥ フィット感を得るために、片方の掌を軽く曲げ、浮いた掌の手袋をもう片方の手で摘み、袖口側に引張ります。
- ⑦ もう片方の手袋も同様に引張ります。



ラテックス (天然ゴム) 製手袋